

# スマートウォッチFG-SW-D03シリーズ 取扱説明書



弊社商品をご購入いただきましてありがとうございます。  
この取扱説明書を読んで、本商品の機能と操作を理解して使用いただきますようお願いいたします。  
また、取扱説明書はレッスン1等のご購入履歴ともども大切に保管いただきますようお願いいたします。  
※アプリ内容は予告なく変更する場合がございます。変更内容は弊社ホームページの製品情報ページにて確認する事が出来ます。

## 1. パッケージ内容

- ・製品本体 1
- ・充電ケーブル 1
- ・取扱説明書 1

## 2. 本商品の主な機能


- 🕒 時刻表示：時刻と日付を表示します。  
(アプリと接続すると時刻は自動的に電話の時刻と同期します。)  
※スマートウォッチ側で時刻を設定することはできません
- 🏃 スポーツ情報：1日あたりの歩数、カロリーの数を自動的に記録します。
- 📈 心拍数測定：スマートウォッチの表示を心拍数測定に切り替えてタッチキーを長押しすると心拍数を測定します。  
※スマートウォッチ画面に表示される心拍数は、最新の測定データです。
- 🩺 血圧測定：スマートウォッチの表示を血圧測定に切り替えてタッチキーを長押しすると血圧を測定します。  
※アプリ操作でも測定することもできます。
- 🩸 血中酸素測定：スマートウォッチの表示を血中酸素濃度測定に切り替えてタッチキーを長押しすると血中酸素濃度を測定します。
- 🛌 睡眠モニター：毎日の睡眠をモニターして睡眠の質を表示します。
- 🚴 エクササイズモード：ランニング、登山、自転車3つのモードがあります。  
各モードのインターフェイスでは、移動時間の記録して消費カロリーを算出して表示します。
- 📱 スマートリマインダー：電話やSMSに着信がある場合、スマートウォッチ画面に情報が表示されます。
- 🗨️ その他の機能：選択してタッチキーを長押しすると機能が使用できます。  
ストップウォッチ、  
電話を見つける(長押しすると接続された端末に通知されます。)、  
電源オフ(長押しすると電源をオフにします。)、  
リセット機能(長押しするとスマートウォッチをリセットします。)、  
QRコード(アプリダウンロード用のQRコードを表示します。)

- 📱 その他：手を挙げることで画面表示することができます。長時間着座していると通知で知らせます。  
リモートシャッターでスマートフォンのカメラで写真を撮ることができます。

## 3. 注意事項

- ・この製品はIP67レベルの防水仕様です。手を洗ったり、雨中等での着用は問題ありませんが、潜水や激しい水中スポーツなどにはご使用できません。
- ・高温のシャワー/風呂またはサウナではご使用できません。
- ・夏の自動車内などの高温になる場所での保管は避けてください。
- ・本商品の搭載する健康センサーは簡易的なもので医療器具としては使用できません。データはあくまで目安としてください。
- ・落下させたり、ぶつかったりして強い衝撃を与えないでください。
- ・小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。


## 4. 本体の説明

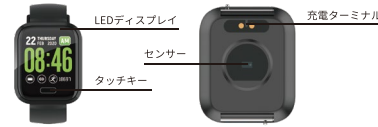

タッチキーの操作  
短押し：機能を切り替えます。  
長押し：機能の選択、決定、終了をします。

## 5. 充電方法

- 時計を初めて使用するときは完全に充電してください。
- 図のように充電ケーブルを本商品に装着してください。
- ※充電ケーブルの充電端子と本商品背面の充電ターミナルが接触するように接続してください。
- ※充電中は画面に充電中状態をニモーション表示されます。
- バッテリーが完全に充電されるとインジケータライトは点灯します。
- ※長期間使用しない場合はバッテリー寿命を延ばすために3か月に1度の目安で充電してください。

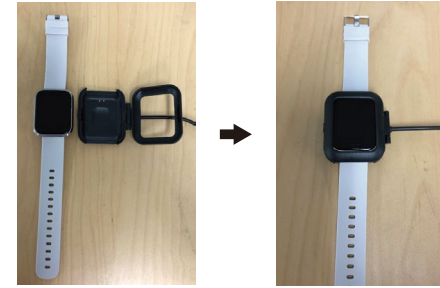

## 6. アプリのインストール方法

- (1) App StoreまたはGoogle Play Storeでアプリ名「WearFit」を検索してアプリをスマートフォンにインストールしてください。
- ※インストール時にアプリの権限を全て「許可」してください。



ヘルスケア/フィットネス



iPhone



Android

- ※QRコードを読み取れない場合があるので、その際は「WearFit」アプリでアプリを検索してください。
- (2) スマートフォンのBluetoothをオンにしてアプリ画面の「設備管理」でスマートフォンとペアリングしてください。
- ※本アプリを使用する時に「直接アクセス」を選択するとユーザー登録は必要ありません。
- ※接続管理画面で「P30」が出てこない場合はスマートフォンのBluetooth設定画面で「P30」を削除してください。

## 7. 本商品の装着

背面のセンサーが肌に触れるように締めすぎず、締め付けすぎないようにバンドを調整して装着してください。  
注意：長時間の使用や汗をかいた場合や温度が高い場合などは、肌のかぶれにご注意ください。  
本体、ベルトは常に清潔な状態を保ってください。

## 8. 本商品の電源のオンとオフ

本商品メニューの電源で電源オフにできます。  
電源オフ状態でタッチキーを長押しすると電源がオンになります。

## 9. 画面の表示方法

本商品の画面は通常時は消えています。  
画面を表示させるには、タッチキーを押してください。


ひじを曲げた状態で手前を腕を回転させることによっても画面を表示できます。  
※アプリ設定で「スクリーン自動点灯」をオンにしてください。



## 10. アプリの機能紹介

※アプリのバージョン、スマートフォンの機種により表示が異なる場合があります。

### 1. ホームページ、測定、測定結果

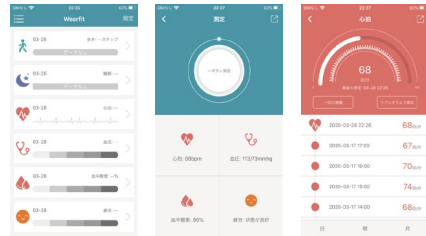

- 🌙 2.睡眠モジュール：毎日、毎週、毎月の睡眠情報をチャート形式で記録します。  
プレスレットのデータに基づいて、毎日の睡眠の質と睡眠時間を計算します。
- 🚶 3.ステップモジュール：グラフが描画され、それに応じてステップ、距離、消費カロリーが表示されます。ユーザーに日次、週次、月次データの洞察を提供します。
- 📈 4.心拍数モジュール：毎日、毎週、毎月の心拍数の詳細情報を提供します。  
心拍数は1時間ごとに読み取られます。
- 🩺 5.血圧モジュール：毎日、毎週、毎月、血圧の詳細情報を提供します。血圧は1時間ごとに読み取られます。
- 🩸 6.血中酸素モジュール：血中酸素の詳細情報を毎日、毎週、毎月提供します。  
あなたの血中酸素は1時間ごとに読み取られます。
- 🏃 7.疲労モジュール：リアルタイムの疲労を測定し、1時間ごとに情報を表示します。

## 11. 故障かなと思ったら

- (1) ペアリング時に本製品と接続できない。
  - ① スマートフォンのBluetoothがオンになっている事を確認してください。
  - ② スマートフォンのBluetooth設定で接続してしまった場合は、この設定を削除してからアプリのハンデリングで接続してください。
  - ③ アプリ「WearFit」の権限が許可されていない場合は許可してください。
- (2) ペアリング完了後に本製品がアプリに認識されない。
  - ① 本製品のバッテリー残量が少ない場合があります。充電してください。
  - ② 再度ペアリングしてください。
- (3) アプリにデータが表示されない。
  - ① スマートフォンのBluetoothがオンになっている事を確認してください。
  - ② アプリのホーム画面を下にスライドさせて手動でデータ同期を行ってください。

## 12. 主な仕様

- 画面サイズ : 1.3インチ
- Bluetooth : Bluetooth4.0
- 防水防塵 : IP67
- バッテリータイプ : リチウムポリマー電池
- バッテリー容量 : 170mAh
- スタンバイ時間 : 約15日間
- 充電時間 : 約1.5時間
- 寸法 : 約37mm x 12mm x 250mm (ベルト含む)
- 充電方法 : クリップ式充電
- 材質 : softTPU

## 保証書

- ・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換することを保証いたします。
- ・本製品の保証期間はお買い上げ日より一年間です。
- ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- ・使用上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。  
無くされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・製品使用時に飲料または液体が浸入しないようご注意ください。液体が浸入した製品は不安定となり、修理できなくなる場合がございます。
- ・本保証は新品購入品に対して有効です。  
個人売買、ネットオークション、転売等については保証範囲に含まれません。
- ・本保証は製品の不具合にのみ適用されます。  
本製品による損害につきましては一切保証いたしかねます。

保証書	
品番	FG-SW-D03シリーズ
保証期間	ご購入日より一年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所
	お名前
	電話 ( ) -
販売店	販売店名

FUGU INNOVATIONS  
FUGU INNOVATIONS  
販売元:株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN  
お問合せメール:info@fugu-innovation.com  
ホームページ:https://www.fugu-innovation.com